

lidergrip®

Vendaje tubular compresivo

Vendaje compresivo
de presión uniforme
y prolongada



Soporte y rehabilitación
Tratamiento de tirones y torceduras
Lesiones leves de la piel
Dislocaciones de articulaciones
Cicatrices de quemaduras
Lesiones en la caja torácica

lidergrip

Compuesto de un 79% de hilo de algodón 100% de color crudo, el 10% de cobertura de poliéster y el 11% de elastómero natural (LATEX) o la versión compuesta por un 88% de hilo de algodón, un 7% de cobertura de poliéster y un 5% de elastómero sintético (SIN LATEX), es un vendaje tubular elástico compresivo para soporte y rehabilitación, que por sus especiales características, permite ejercer una presión uniforme y prolongada sobre la parte del cuerpo en la que se aplica.

Lidergrip está fabricado en algodón con hilos elásticos recubiertos que recorren el tejido formando espirales que facilitan la libertad de movimiento. Lidergrip proporciona al paciente, un soporte efectivo y duradero con una total libertad de movimientos. Su ajuste es fácil y rápido.

Lidergrip se mantiene en posición de forma segura sin agujas o tiras, a diferencia de otras vendas convencionales. Al poderse aplicar de nuevo después del lavado, sin pérdida de eficacia, Lidergrip resulta particularmente útil para pacientes ambulantes o domiciliarios. Lidergrip reduce la posibilidad de malgastar el producto, ya que puede cortarse la cantidad exacta necesaria.

Lidergrip debe aplicarse en doble capa para que la presión sea la correcta, la capa superior tiene que acabar 2 o 3 cm por encima de la inferior.

TALLAS Y APLICACIONES

REF con latex	REF sin latex	MEDIDA	APLICACIÓN
0020801	0020401	LIDERGRIP A (4,5 cm.)	Extremidades niños
0020802	0020402	LIDERGRIP B (6,3 cm.)	Muñecas y tobillos delgados
0020803	0020403	LIDERGRIP C (6,8 cm.)	Extremidades medias de adulto
0020804	0020404	LIDERGRIP D (7,5 cm.)	Brazos gruesos y piernas
0020805	0020405	LIDERGRIP E (8,8 cm.)	Piernas y muslos pequeños
0020806	0020406	LIDERGRIP F (10 cm.)	Piernas gruesas y muslos
0020807	0020407	LIDERGRIP G (12 cm.)	Muslos gruesos
0020808	0020408	LIDERGRIP J (17,5 cm.)	Troncos delgados
0020809	0020409	LIDERGRIP K (21,5 cm.)	Troncos medios
0020810	0020410	LIDERGRIP L (32,5 cm.)	Troncos gruesos
0020811	0020411	LIDERGRIP M (35 cm.)	Troncos extra-grandes

APLICADORES

MEDIDA	APLICACIÓN
E	Manos p., brazos p/m
F	Manos p., brazos p/m/g, tobillos p/m rodillas p.
G	Brazos g., tobillos m/g, rodillas p/m/g, muslos p/m.
H	Tobillos g., rodillas m/g.



Los aplicadores son muy útiles para la colocación de los mencionados vendajes tubulares compresivos.



LIDERMED, S.A.

Rosselló, 105 3ª Planta
08303 MATARÓ Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 757 21 47
Fax +34 93 757 21 56
e-mail: lidermed@lidermed.com
www.lidermed.com



Producto Clase I No Sterile

